

eye²well

Augenspray

Augenspray mit Liposomen und Dexpanthenol. Ohne Konservierungsmittel.

Gebrauchsanweisung:

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung:

Lecithin 10mg/ml, Dexpanthenol, Natriumchlorid, Ethanol, Vitamin A - Palmitat, Aqua Purificata

Indikation und klinischer Nutzen:

eye²well Augenspray stabilisiert und schützt den Tränenfilm und verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche und der Augenlider. Zur Behandlung und Linderung externer, umweltbedingter Reizungen des Auges durch Wiederherstellung des gestörten Tränenfilms. Anzuwenden bei trockenen, brennenden, juckenden, müden, tränenden, gereizten Augen oder Fremdkörpergefühl.

Leistungsmerkmale:

Liposomen (Lecithin) ergänzen die schützende Lipidschicht des Tränenfilms.

Anwendung:

- Sprühen Sie 1-2 mal aus einem Abstand von 10cm auf die geschlossenen Augenlider.
- Bei der Nutzung von Augen Make-up einen etwas größeren Abstand einhalten, um ein Verlaufen des Make-ups zu verhindern.
- Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 3 bis 4 mal tägliche Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden kann **eye²well Augenspray** bedenkenlos häufiger angewendet werden.

Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich. Kann auch während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 10 Minuten eingehalten werden.
- Nicht in das geöffnete Auge sprühen.
- Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nebenwirkungen:


In sehr seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden leichten Reizungen (z.B. Rötungen, Schwellungen der Augenlider) kommen, die auf den Anwendungsbereich begrenzt sind. Sie treten akut auf und klingen nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos ab. Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Hinweise:

Aus technischen Gründen kann eine Restmenge in der Flasche verbleiben. Das angegebene Füllvolumen kann vollständig entnommen werden, da die Flasche überbefüllt ist. Bei Erstverwendung sind mehrere Pumpstöße notwendig.

eye²well Augenspray ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opaleszente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin. Es kann im Laufe der Lagerung zum Auftreten von bräunlichen Trübungen/Ablagerungen, insbesondere innerhalb des Pumpenkörpers im Bereich der Feder, kommen. Dies ist ein Charakteristikum der enthaltenen pflanzlichen Bestandteile (Lecithin), das aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit oder Verträglichkeit ist.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung:

Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur, nicht einfrieren. Nach Anbruch 6 Monate  verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.

Stand der Information: 2025-02



Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7
CH-6300 Zug



Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17
DE-85399 Hallbergmoos



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
IT-39100 Bolzano (BZ)

Vertrieb durch:

Brillen-Profi-Contact GmbH
Mindelheimer Str. 19
DE- 87600 Kaufbeuren
www.brillen-profi.de



CE 0482