

Hyaluron 0,3 % Dexpanthenol Augentropfen

Befeuchtende und pflegende Augentropfen mit 3 mg/ml Natriumhyaluronat und Dexpanthenol

Ohne Konservierungsmittel.

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, sie dient dazu, das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat 3 mg/ml, Dexpanthenol, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Calciumchlorid Dihydrat, Natriumhydrogencarbonat, Aqua purificata.

Indikation und klinischer Nutzen


Zur intensiven Befeuchtung und Pflege der Augenoberfläche bei trockenen, müden, gereizten, überanstrengten oder brennenden Augen aufgrund des trockenen Augen Syndroms und von Umweltfaktoren (z. B. Medikamente, Umweltverschmutzung, Computernutzung, Klimaanlage, Allergie, Benetzung von Kontaktlinsen während des Tragens) sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

Das Tragen von Kontaktlinsen wird durch die Anwendung angenehmer.

Leistungsmerkmale

Konservierungsmittelfreie wässrige Lösung auf Basis von Hyaluronsäure und Elektrolyten. Aufgrund der hohen Wasserbindungskapazität wird das Auge intensiv befeuchtet und durch die Kombination von Hyaluron und Dexpanthenol zusätzlich gepflegt.


Anwendung

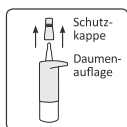

1. Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen und nach der Anwendung wieder aufsetzen. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Tropferspitze. Vor der ersten Anwendung den Tropfer so oft drücken, bis der erste Tropfen erscheint. Danach ist er für die folgenden Anwendungen gebrauchsfertig.




2. Legen Sie den Daumen auf die ergonomische Daumenauflage und umschließen Sie den unteren Teil der Flasche mit den anderen Fingern.

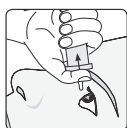

3. Den Kopf etwas nach hinten neigen und die Flasche mit der Tropferöffnung senkrecht nach unten über das Auge halten.



4. Das Auge vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger öffnen oder das Unterlid leicht nach unten ziehen.

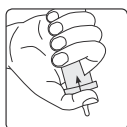

5. Durch Drücken der Daumenauflage bringen Sie 1–2 Tropfen je Auge auf die Augenoberfläche oder in den Bindehautsack ein.

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 4-mal tägliche Anwendung. Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit können die Augentropfen bedenkenlos häufiger angewendet werden. Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich. Hyaluron 0,3 % Dexpanthenol Augentropfen können während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten eingehalten werden.

Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos abklingen.

Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Hinweise

Unmittelbar nach der Anwendung kann die Sehschärfe kurzfristig beeinträchtigt sein.

Für Erwachsene und Kinder.

Kinder sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

In sehr seltenen Fällen wurde von Hornhautkalkifizierungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Augentropfen mit erhöhter Phosphatkonzentration bei Patienten mit erheblich beschädigter Hornhaut berichtet. Hyaluron 0,3 % Dexpanthenol Augentropfen enthalten lediglich die physiologische Phosphatkonzentration, so dass ihre Anwendbarkeit auch bei bestehenden stärkeren Hornhautstörungen/-schädigungen grundsätzlich nicht eingeschränkt ist. Sofern zusätzlich weitere Augentropfen-Präparate angewendet werden, sollte in diesem Zusammenhang aber auf deren Phosphatgehalt geachtet werden, da insbesondere bei Antiglaukomatosa oder Antiallergika erhöhte Phosphatkonzentrationen enthalten sein können.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung

Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur, nicht einfrieren.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.



Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7, 6300 Zug, Schweiz



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5, 39100 Bolzano (BZ), Italien

Vertrieb




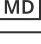
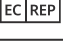
apo.com Group GmbH, Magdeborner Str. 14,
04416 Markkleeberg, Deutschland

Importeur

Optima Pharmazeutische GmbH,
Ludwigstr. 49, 85399 Hallbergmoos, Deutschland

Symbolerklärung

Gebrauchsanweisung beachten	
Chargennummer	
Verfallsdatum (JJJ-MM: Jahr-Monat)	
Hersteller	
Herstellungsdatum	

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren	
Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist	
Nach Anbruch 6 Monate verwendbar	
Medizinprodukt	
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	

CE 0482*Stand der Information: 2025-01*